



→ FICHE UTILISATEUR MASQUE FFP2

PRECONISATIONS POUR METTRE LE MASQUE

→ Lavez-vous les mains avant et après le port du masque.

UTILISATION/ELIMINATION

- Pour des règles d'hygiène, il est recommandé de **changer les masques toutes les 3H**
- Veuillez jeter les masques dans les poubelles classiques

CONDITIONS D'UTILISATION



1 Repérer le haut (barrette nasale).



2 Passer les élastiques derrière la tête, de part et d'autre des oreilles.



3 Vérifier que le masque couvre bien le menton.



4 Ajuster le masque en pinçant la barrette sur le nez.



5 Tester l'étanchéité : couvrir le masque avec une feuille en plastique et inspirer ; le masque doit se plaquer sur le visage.



6 Après usage, retirer le masque par les élastiques.